

Uma forma fácil e rápida de partilhar os seus resultados de glicemia com o seu profissional de saúde

Torne-se utilizador da CONTOUR DIABETES app e ligue-se ao seu profissional de saúde remotamente*

1

Descarregue
CONTOUR®
DIABETES app



Download gratuito




Descarregar na
App Store

DISPONÍVEL NO
Google Play

Consulte por favor a lista de medidores compatíveis em: compatibility.contourone.com

2

Crie
uma conta

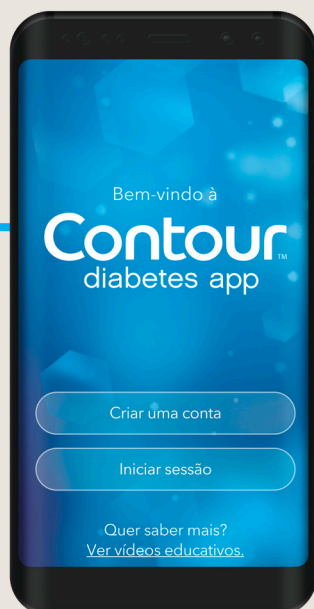

3

Emparelhe o seu
medidor CONTOUR®
compatível



Para mais informações visite:
diabetes.ascensia.pt

Integração simples para permitir visualização das suas glicemias pelo seu profissional de saúde de forma remota

Aguarde pelo convite do seu profissional de saúde

Convite **via email** ou Convite **via QR code**

Receba um convite por email e aceda ao link*



1

Faça scan do QR code durante a consulta

Adicionar novo doente

Manual Código QR

Primeiro nome Sobrenome

Pais

Informação opcional

Quero enviar um convite por e-mail a este doente

Endereço de email

Adicionar novo doente

Adicionar novo doente

Manual Código QR

2

Para aceder, utilize o seu nome de utilizador e palavra-passe da sua CONTOUR®DIABETES app

Doente Profissional

Contour Entering with you Para fazer login na sua conta, use as credenciais da CONTOUR®DIABETES App.

Endereço de email

Senha Esqueceu-se da sua senha?

Relembre-me

Entrar Não tem uma conta? **Criar**

3

Preencha as suas informações



A partir de agora a informação das suas glicemias estará disponível para o seu profissional de saúde aceder através do GlucoContro.online

* O profissional de saúde inicia o convite



Apoio ao Cliente:

808 269 269

(Dias úteis, 9h às 17h)

diabetescare.portugal@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.pt

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. May 2021. PP-GluCo-GBL-0006

PRO.0270.21 Rev. Ago./21

Ascensia Diabetes Care Portugal, Lda.

Para um uso seguro, leia cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização dos dispositivos médicos: medidores e tiras-teste de glicemia (para diagnóstico *in vitro*) e dispositivos de punção capilar, lancetas e aplicações de gestão da diabetes. | Ascensia, o logótipo da Ascensia Diabetes Care e Contour são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos U.S e em outros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. A Google Play e o logótipo da Google Play são marcas comerciais da Google LLC. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários e são utilizadas apenas para fins informativos.